

4 kroki dezynfekcji narzędzi



#1

Przygotowanie do dezynfekcji

W wydzielonym pomieszczeniu lub z dala od miejsca zabiegu przygotuj wanienkę do dezynfekcji. Wyposażoną w sito i szczelną pokrywkę.

Pojemność wanienki powinna być adekwatna do potrzeb: ani za duża, ani za mała.

Przygotuj roztwór roboczy o odpowiednim stężeniu środka dezynfekcyjnego. Roztwór należy opisać po sporządzeniu. Pamiętaj, że ma określony czas ważności. Można go przygotować bezpośrednio w wanience lub w pojemniku do przelewania.

Wanienka musi być zakryta, aby preparat nie parował i nie tracił swoich właściwości.

Warto stosować preparaty z dodatkowymi właściwościami myjącymi.

Dezynfekcja narzędzi

Bezpośrednio po użyciu narzędzia i sprzęt kładzie się na tacy z przyrządami przeznaczonymi do dezynfekcji.

Jeśli są wyraźnie zabrudzone substancją organiczną można je dodatkowo wyczyścić.

Po zakończonym zabiegu wszystkie narzędzia wkłada się do wanienki – tak by były w pełni zanurzone w roztworze.

Następnie należy szczelnie zamknąć wanienkę i odczekać wymagany czas dezynfekcji.

Na naklejanej etykiecie oznacza się godzinę rozpoczęcia dezynfekcji i jej zakończenia.

Czas liczy się od włożenia ostatniego przyrządu. Wanienkę należy również podpisać.

#2

#3

Po zakończonej dezynfekcji

Po skończeniu dezynfekcji przenosimy wanienkę nad miejsce ich mycia – dwukomorowy zlew.

Wyjmujemy narzędzia na sicie, myjemy pod bieżącą wodą i rozkładamy na serwecie do osuszenia.

Pakowanie narzędzi


Suche narzędzia pakuje się do torebek lub rękawów – pakiety powinny zawierać sprzęt wykorzystywany przy jednym zabiegu.

W dodatku powinno się je łatwo wyjmować. Dlatego narzędzia układa się rękojeścią do otwarcia pakietu.

Narzędzia można układać pakietami jedno na drugie, zgodnie z zasadą: papier do papieru, folia do folii.

Pakiety nie powinny się dotykać w autoklawie, co znaczy, że należy układać je raczej luźno, niż zbijać w grupy. Lepiej dokonać kolejnej sterylizacji, niż przesadzić z ilością wsadu. Pakiety nie mogą dotykać ścianek.

Należy przestrzegać zasad użytkowania sterylizatora. Wymagane jest działanie zgodne z jego instrukcją. Szczególnie nie należy przekroczyć obciążenia wsadu, unikać dotyknięcia ścianek przez pakiety.

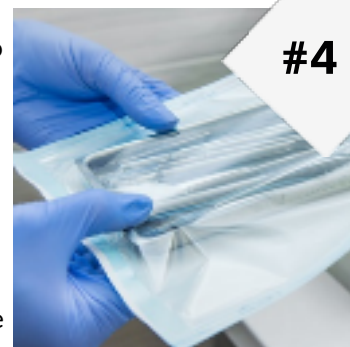

#4



dezynfekcja24.com

SPÓŁKA Z O.O.